

AG Cuffill Druckmessgerät

Kurzanleitung

- **Vor dem Gebrauch** sicherstellen, dass die Spritzenspitze offen ist und somit der Umgebungsdruck gegeben ist.
- Das Gerät durch Drücken der gelben Taste auf der rechten Seite anschalten.
- Das Display zeigt nun die Anzahl der verbliebenen Messungen an und wechselt dann zu "00" (Druck).

Im Falle, dass das Display einen anderen Wert als "00" anzeigt, die gelbe Taste für 5 Sekunden drücken um das Gerät zu kalibrieren. Das Gerät ist einsatzbereit, wenn der angezeigte Druck "0" ist.

– **Für die Messung des Cuff Drucks** – Das Gerät mit der Cuff-zuleitung, wie angezeigt verbinden (Spritzenkolben komplett drin), der effektive Druck wird angezeigt.



– **Für die Anpassung des Cuff Drucks** – Das Gerät mit der Cuff-zuleitung, wie angezeigt verbinden (Spritzenkolben bei 5 - 10 ml) und den Druck durch Reinschieben des Kolbens anpassen. Der effektive Druck wird angezeigt.



Das Display schaltet sich nach 60 Sekunden aus.