




VITREX® Steriheel Baby Plus Sicherheitslanzette

Bedienungsanleitung




1. Die Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer (70 % Isopropylalkohol) reinigen und die Haut an der Luft trocknen lassen.

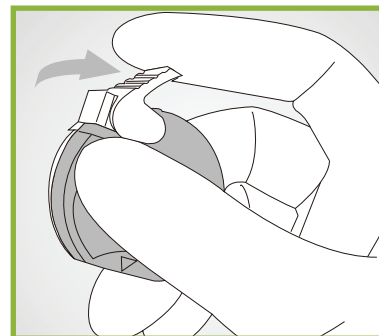

2. Den Auslösemechanismus entsichern, indem die Sicherheitslasche nach unten gedrückt wird.



3. Den Fuß des Säuglings auf eine geeignete Position anheben und die Klingeöffnung bündig abschließend auf die Ferse aufsetzen.

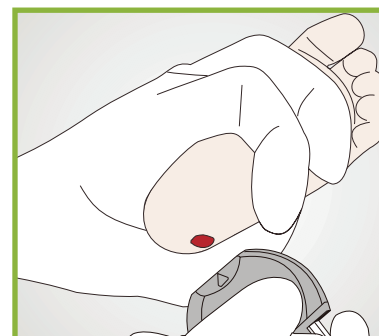

4. Wenn beide Enden der flachen Vorderseite der Lanzette die Haut berühren, diese auslösen und die Lanzette sofort von der Ferse abheben.



5. Den ersten Tropfen Blut mit einem trockenen, sterilen Tupfer vorsichtig abwischen.

Farbe	Spezifikation	Artikelnummer
Grün	0.65 mm Tiefe / 1.40 mm Einschnitt Länge	335213
Orange	0.85 mm Tiefe / 1.75 mm Einschnitt Länge	334213
Gelb	1.00 mm Tiefe / 2.50 mm Einschnitt Länge	333213
Pink	1.14 mm Tiefe / 2.80 mm Einschnitt Länge	332213
Blau	2.00 mm Tiefe / 3.00 mm Einschnitt Länge	331213