

ANLEITUNGSKARTE

Benjamin Boundy


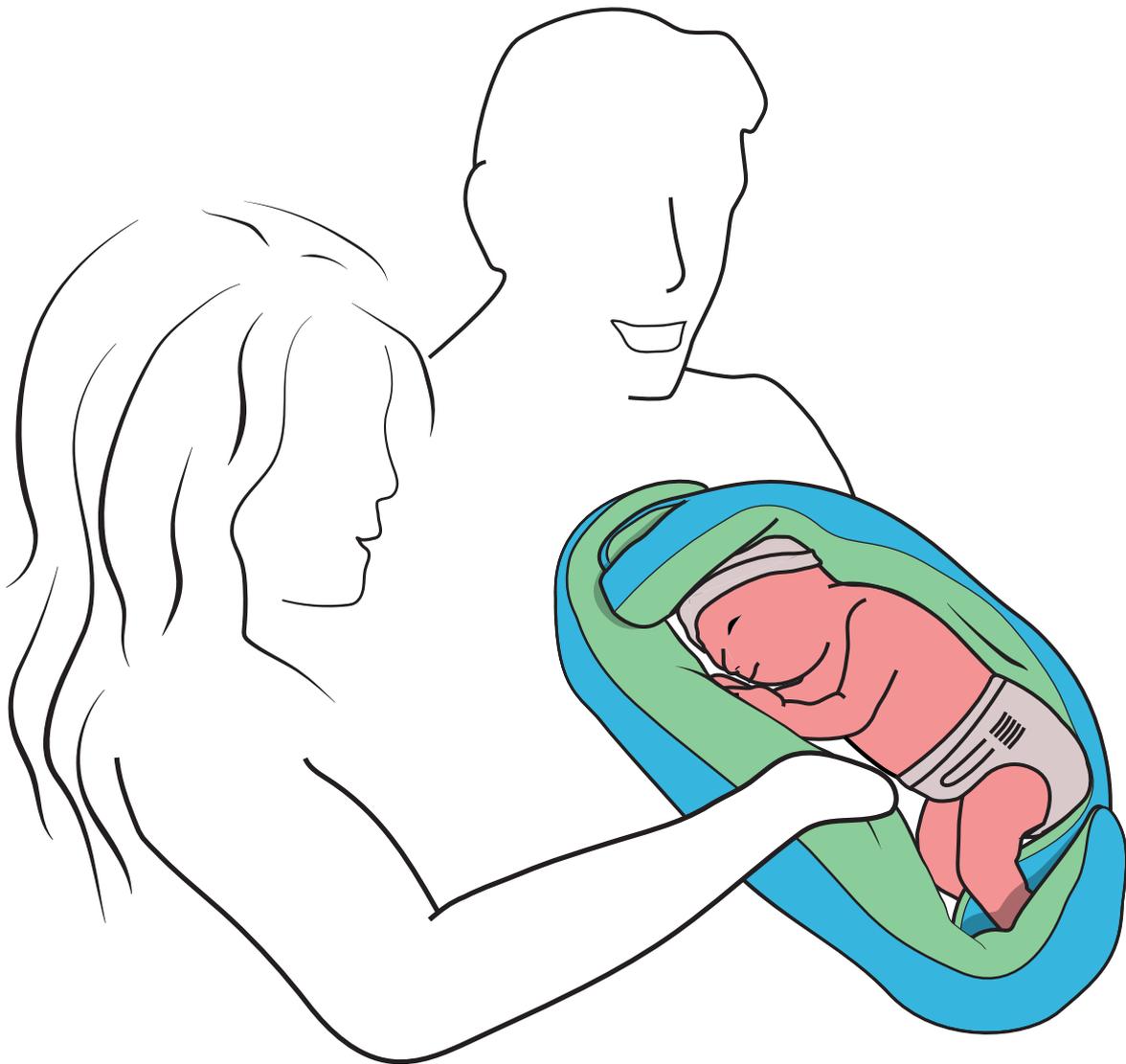




- Immer unter Monitorüberwachung verwenden
- Verwenden Sie den Boundy für Babys in der empfohlenen Gewichtsklasse 2.500 - 5.000 g
- Auf Temperaturschwankungen achten, insbesondere bei Babys, denen gefäßerweiternde Wirkstoffe (z.B. Prostaglandine) verabreicht werden
- Nicht auf Brust, Bauch oder Gesicht legen, da dies die Atmung behindern kann
- Verwenden Sie die Enden nur kurz auf einem Körperteil

Lagerung mit dem Boundy

- Kopf in neutrale Position zum in Mittellinie ausgerichteten Rumpf
- Arme/Beine in Flexionshaltung
- Mund-Hand-Kontakt
- Füße gegen Seite oder unteren Rand
- W-Haltung Arme/Beine vermeiden

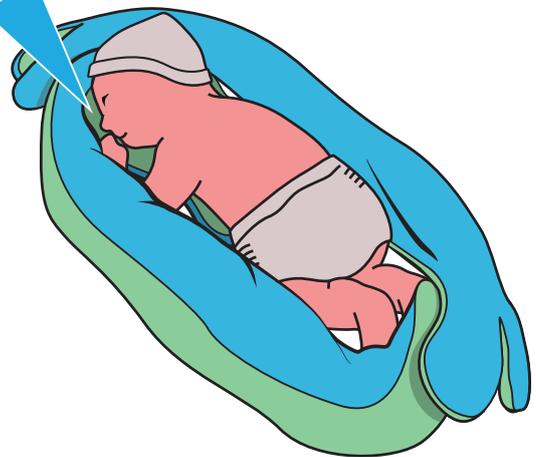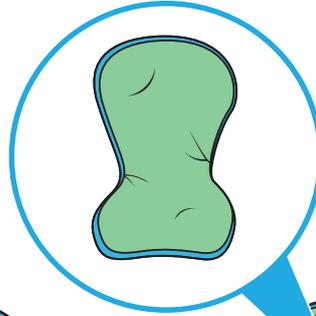


Bauchlage

- Verwenden Sie 2 Benjamin Boundys
- ComfyBelly verwenden (nicht niedriger als Nabelhöhe und nicht breiter als Rumpf).
- Schultern leicht gebeugt und gestützt
- Beine angezogen
- Rand des Boundys soll begrenzen

Seitliche

- Der Rücken des Babys wird am Rande von Boundy gestützt
- Legen Sie den Unterarm nach vorne
- Mund-Hand-Kontakt

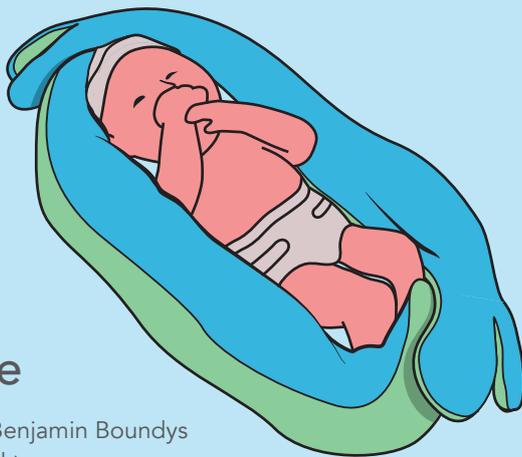

Rückenlage

- Verwenden Sie 2 Benjamin Boundys
- Mund-Hand Kontakt
- Schultern leicht gerundet
- Hüften leicht gebeugt
- Rand des Boundys soll begrenzen

Als "extra Hände"

- Kurzfristig:
"Containment Holding"