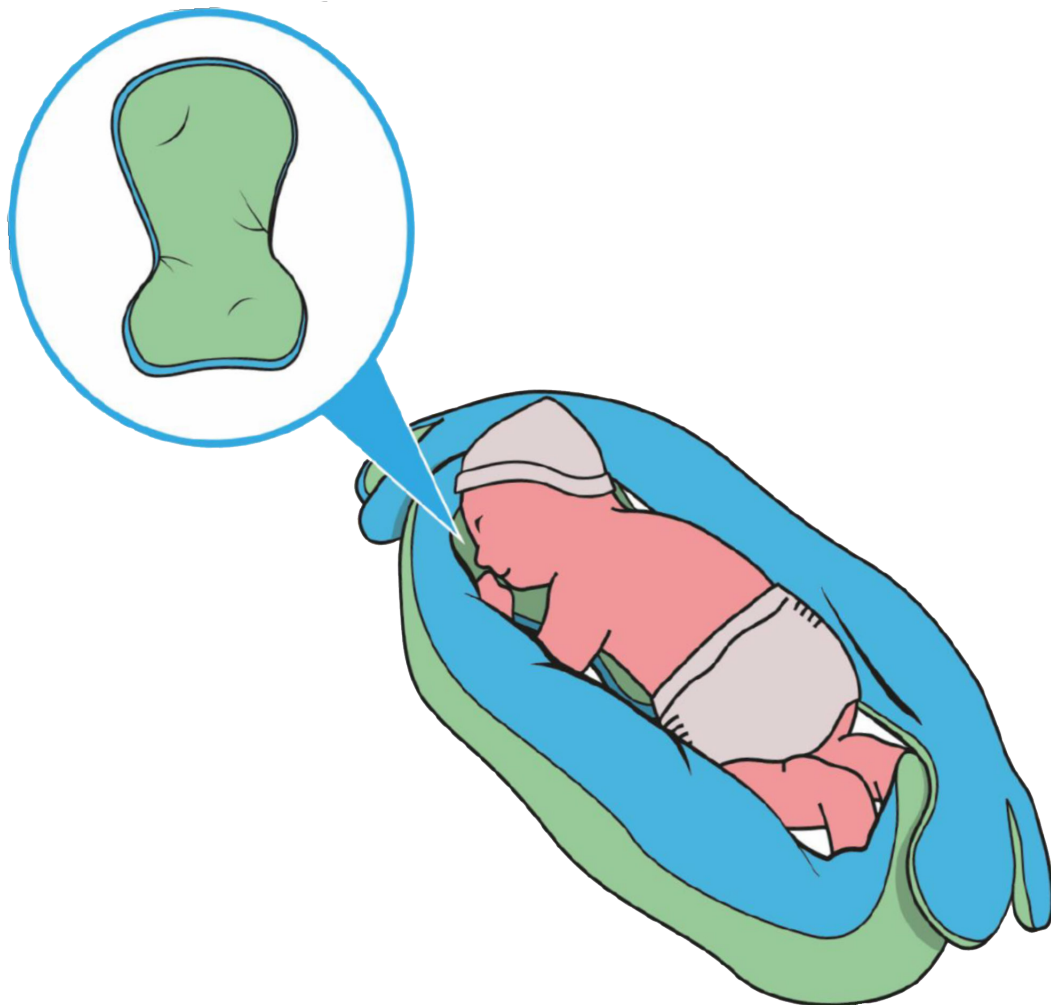

ANLEITUNGSKARTE

Benjamin ComfyBelly





- Immer unter Monitorüberwachung verwenden
- Verwenden Sie den ComfyBelly für Babys in der empfohlenen Gewichtsklasse 500-3500 Gramm
- Ruhen Sie sich nicht auf Brust, Bauch oder Gesicht aus, da dies die Atmung einschränken kann

ComfyBelly

Das ComfyBelly wurde entwickelt, um die Bauchlage von kranken Neugeborenen und Frühgeborenen im Krankenhaus zu unterstützen. Das ComfyBelly trägt zu einer natürlichen Beugung der Schultern bei und fördert die Möglichkeit der Hand-Mund-Koordination und der Mittellinienorientierung. Dies sind wichtige Komponenten zur Unterstützung der Entwicklung von Babys. Bei Verwendung des ComfyBelly werden die Beine des Babys mit dem Becken nach vorne geneigt. Dies fördert die Beugung der Gliedmaßen, ohne übermäßigen Druck auf Knie und Ellbogen auszuüben.

Verwenden

- Positionieren Sie den ComfyBelly unter dem Kopf und dem Oberkörper
- Nicht niedriger als Nabelhöhe und nicht breiter als der Rumpf
- Schultern leicht gewölbt und gestützt
- Die Beine angewinkelt
- Das Baby wird an den Seiten vom ComfyNest oder vom Boundy gestützt

Specifications

- Erhältlich in 4 Größen: S> 500 g - 1500 g - M> 1500 g - 2500 g - L> 2500 g - 4000 g - XL> 4000 g - 5500 g
- Der Stoffbezug besteht aus Hightech-Textil
- Das Innenteil ist aus dem Bezug entnehmbar und gemäß Krankenhausprotokoll zu reinigen
- Bei 60-95 ° waschbar und für den Trockner geeignet
- In Kombination mit dem ComfyNest oder dem Boundy verwenden

