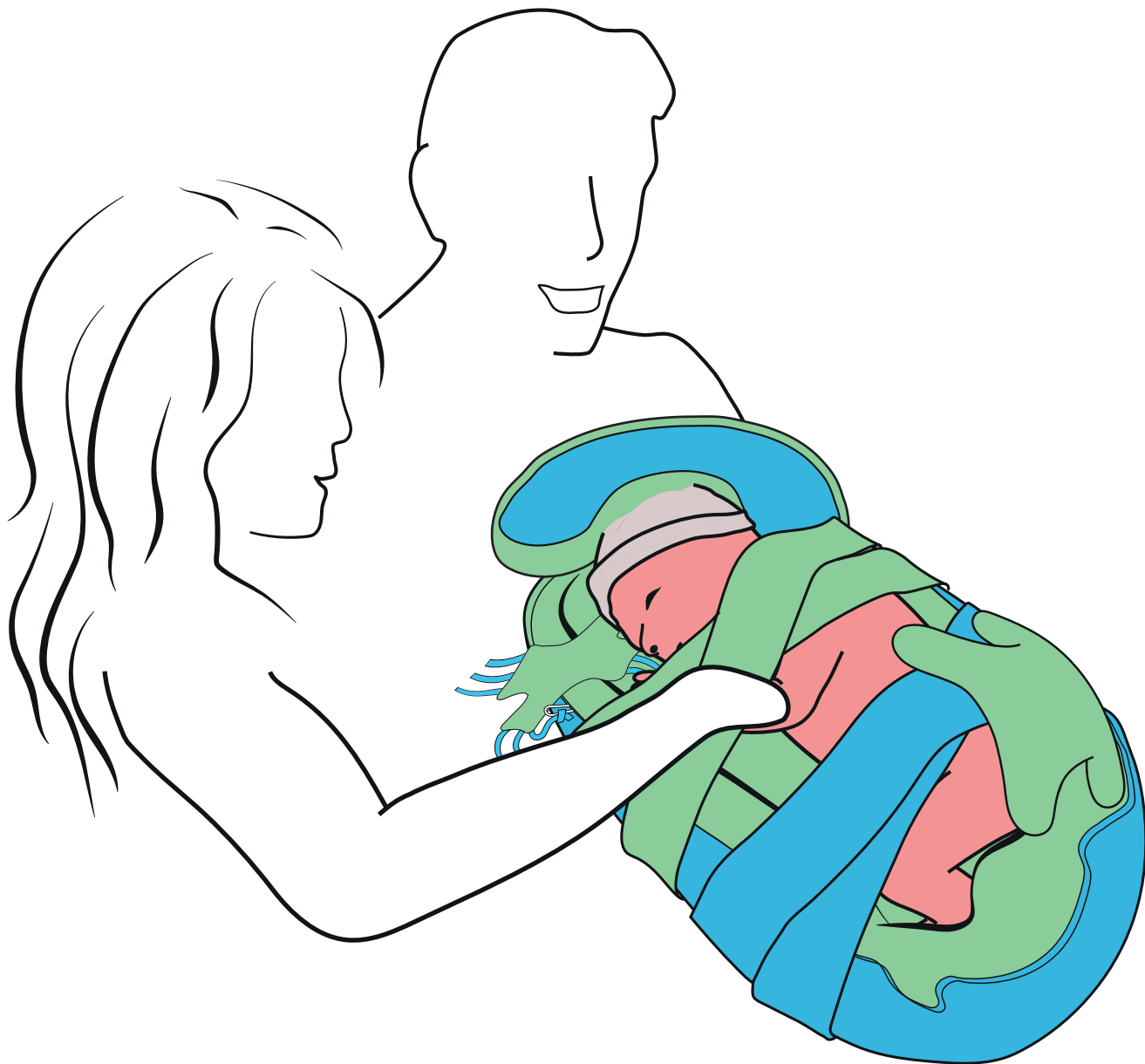
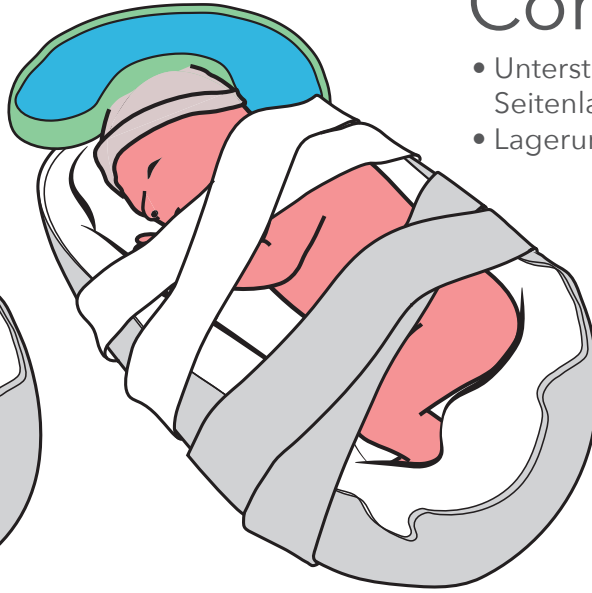
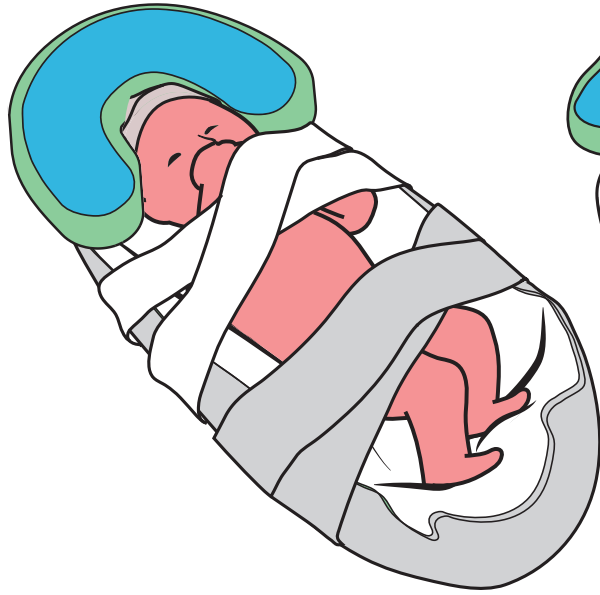

ANLEITUNGSKARTE

Benjamin ComfyNest Zubehör





- Verwenden Sie die passende ComfyPillow-Größe, siehe Gebrauchsanweisung.
- Nicht auf Brust oder Bauch lagern.
- Nicht auf Kopf oder Gesicht lagern.
- Verwendung der Materialien nur unter Monitorüberwachung



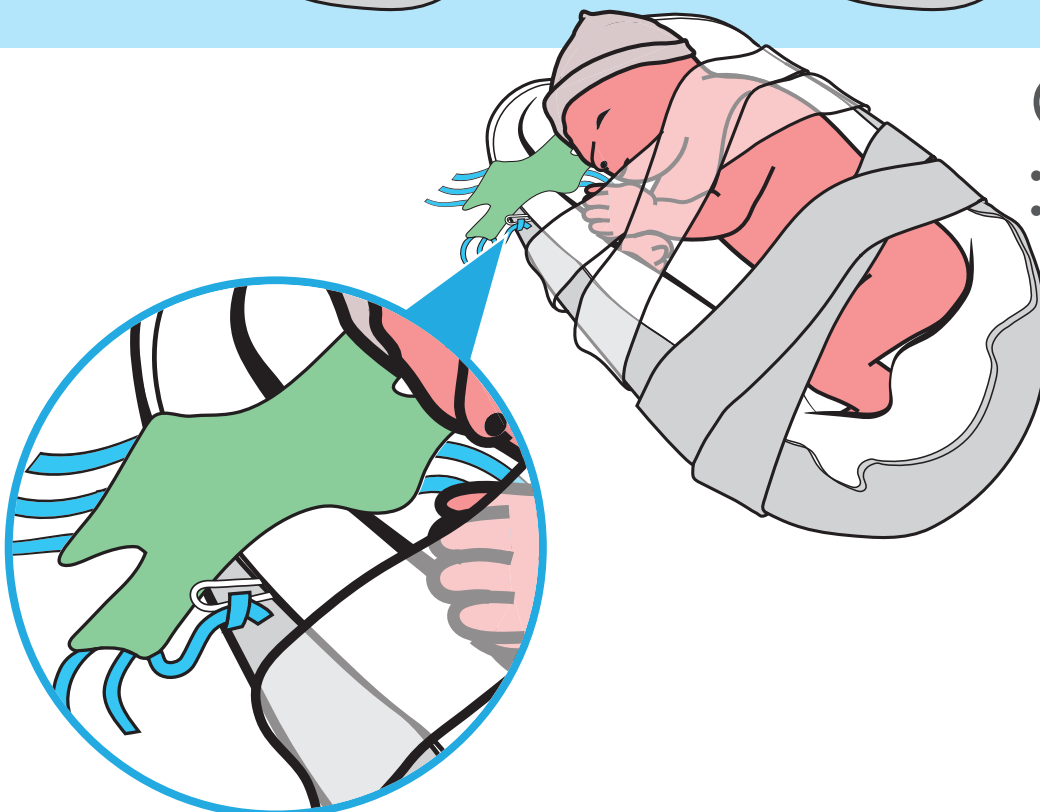
ComfyPillow

- Unterstützung Kopf/Rücken/ Seitenlage
- Lagerungswechselschema beachten



ComfyStar

- Unterstützung Kopf, Hüfte und Nacken
- Für kurze Dauer als „zusätzliche Hand“ verwendbar



ComfyKiss

- Nach Bändchen greifen
- Vor dem Mund als Schmusetuch



Benjamin Care
The closer, the better