

ANLEITUNGSKARTE

Benjamin ComfyNest

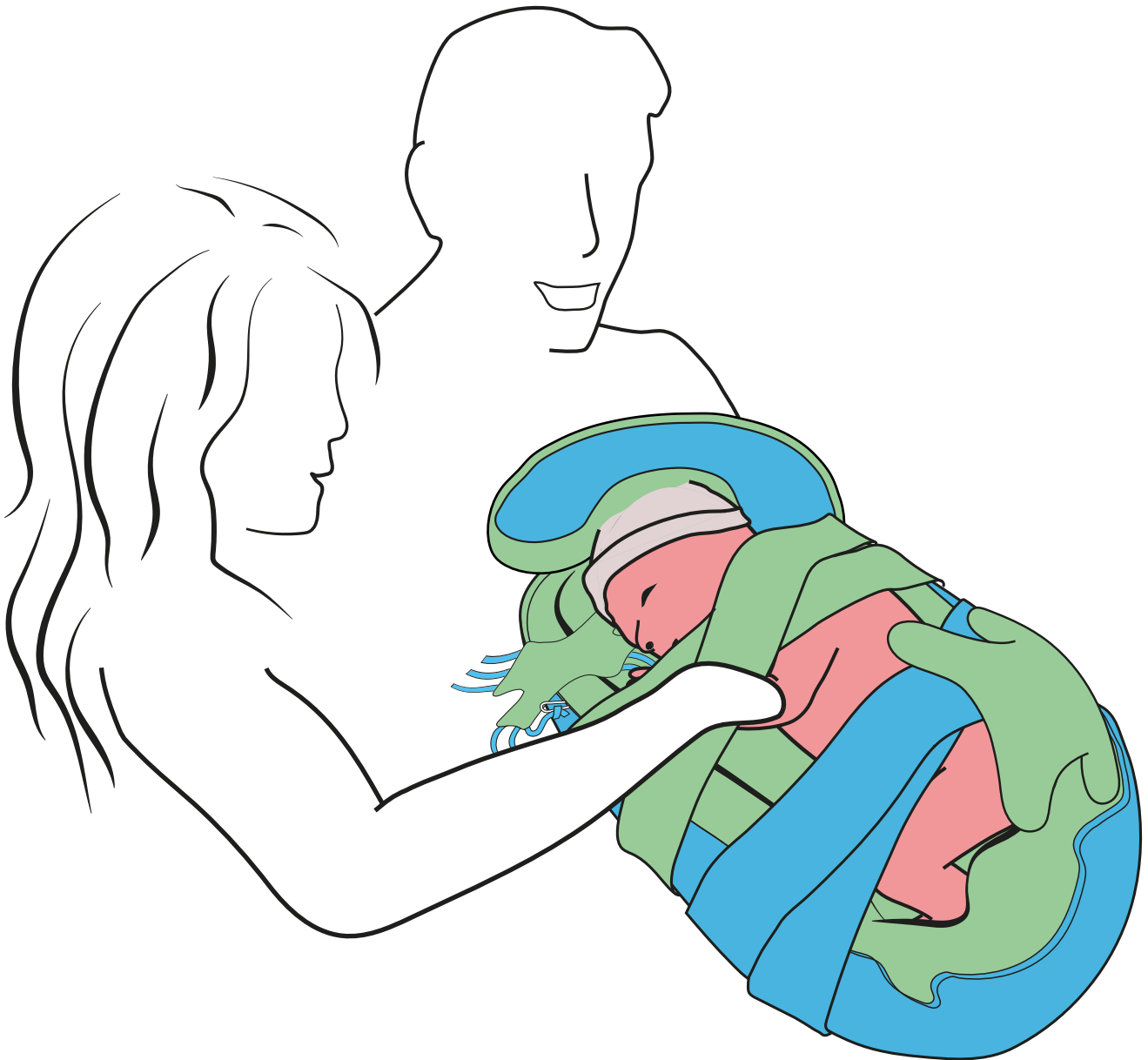



- Geeignete Nestgröße verwenden, s. Gebrauchsanweisung
- Auf Temperaturschwankungen achten
- Nicht im Bett verwenden
- Immer unter Monitorüberwachung verwenden

ComfyNest

Lagerung ComfyNest



- Kopf in neutrale Position zum in Mittellinie ausgerichteten Rumpf
- Arme/Beine in Flexionshaltung
- Füße gegen Seite oder unteren Rand
- Mund-Hand-Kontakt
- W-Haltung Arme/Beine vermeiden

Verwendung der Bänder

- Unkontrollierte Bewegungen einschränken
- Bei Bedarf verwenden
- Nicht zu eng und nicht knoten
- Niemals über Hals und Kopf


Seitenlage

- Unkontrollierte Bewegungen einschränken
- Bei Bedarf verwenden
- Nicht zu eng und nicht knoten
- Niemals über Hals und Kopf

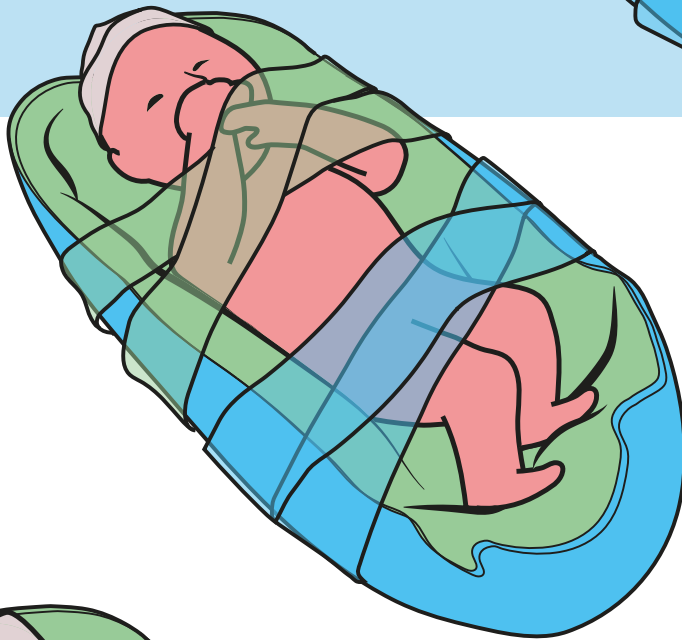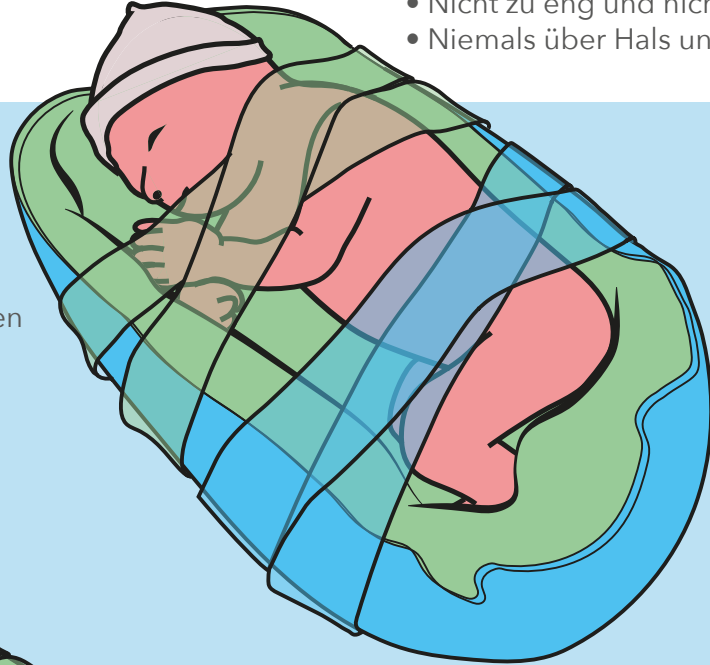

Rückenlage

- Rand des Nestes begrenzt stark
- Extra Unterstützung Kopf mit ComfyPillow
- Schultern leicht gerundet
- Hüften leicht gebogen

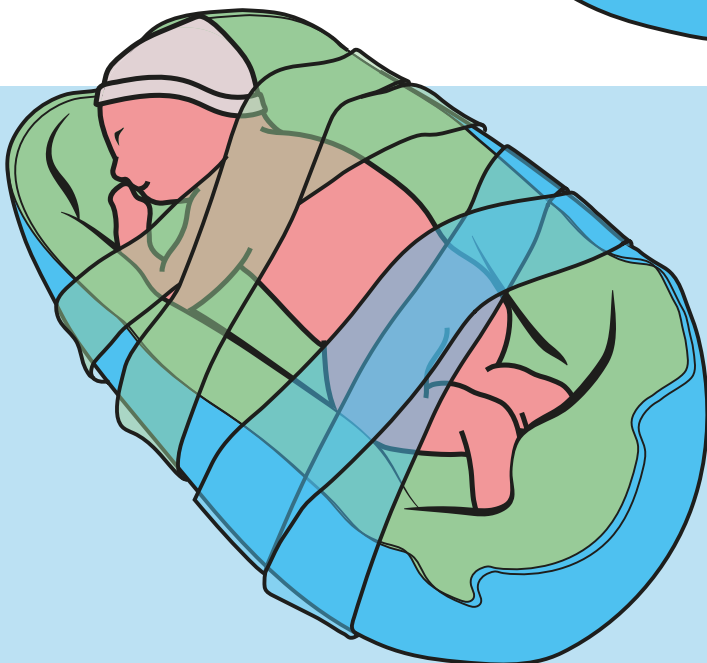

Bauchlage

- Bauchrolle verwenden (nicht niedriger als Nabelhöhe und nicht breiter als Rumpf)
- Schultern leicht gebogen und gestützt
- Beine angezogen
- Rand des Nestes soll begrenzen

