



Vitrex® Sterilance Lite III Sterile Sicherheitslanzette

AKTIVIERUNG PER KNOPF

ANWENDERSICHERHEIT Nadel ist vor und nach der Anwendung komplett geschützt.

BEDIENKOMFORT Vorgespannt, durch Druck auslösend.

PATIENTENKOMFORT Hochwertige, ultrascharfe und dreifachangeschrägte Nadel oder zweifachangeschrägte Klinge, hohe Einstichgeschwindigkeit.

EFFIZIENZ Verschiedene Spitzenkonfigurationen und Einstichtiefen ermöglichen die gängigsten Kapillarblutabnahmen.

ANWENDUNG Blutzucker und andere diagnostische In-Vitro-Tests.

PATIENTENSICHERHEIT steril, Einwegprodukt, nicht für den mehrmaligen Gebrauch.

Technische Daten

Farbkennung	Konfiguration	Einstichtiefe	Artikelnr.	Anwendung
Grün	18G Klinge	1.8 mm	373213	Spezielle Ausführungen für Fersenblutentnahme bei Babys und auf Entbindungsstationen
Violett	28G Nadel	1.8 mm	374213	Diabeteskliniken/Krankenhausstationen zur Blutzuckerkontrolle
Gelb	26G Nadel	1.8 mm	375213	Diabeteskliniken/Krankenhausstationen zur Blutzuckerkontrolle
Blau	26G Nadel	2.4 mm	376213	Wie oben aber für dickere Erwachsenenhaut
Orange	21G Nadel	1.8 mm	377213	Hämoglobin (Blutbanken), Cholesterin, Bluttypisierung, Koagulation, Blutgas und andere diagnostische Tests. Für pädiatrische Zwecke und fast alle Arten von Erwachsenenhaut
Pink	21G Nadel	2.4 mm	378213	Wie oben aber für dickere Erwachsenenhaut

Anwendungsempfehlung

1. Schutzkappe abschrauben.
2. Einstichstelle leicht neben der Mitte der Fingerspitze auswählen, um Schmerzen zu vermeiden und Blutfluss zu maximieren. Lanzette fest gegen die Einstichstelle halten und zum Aktivieren des Instruments den Auslöseknopf drücken
3. Finger sanft in Richtung der Punktionsstelle massieren, um die erforderliche Blutmenge zu erhalten.
4. Sicherheitslanzette in einem geeigneten Sicherheitsbehälter entsorgen.