


GEBRAUCHSANWEISUNG

Benjamin Kangaroo Sweater

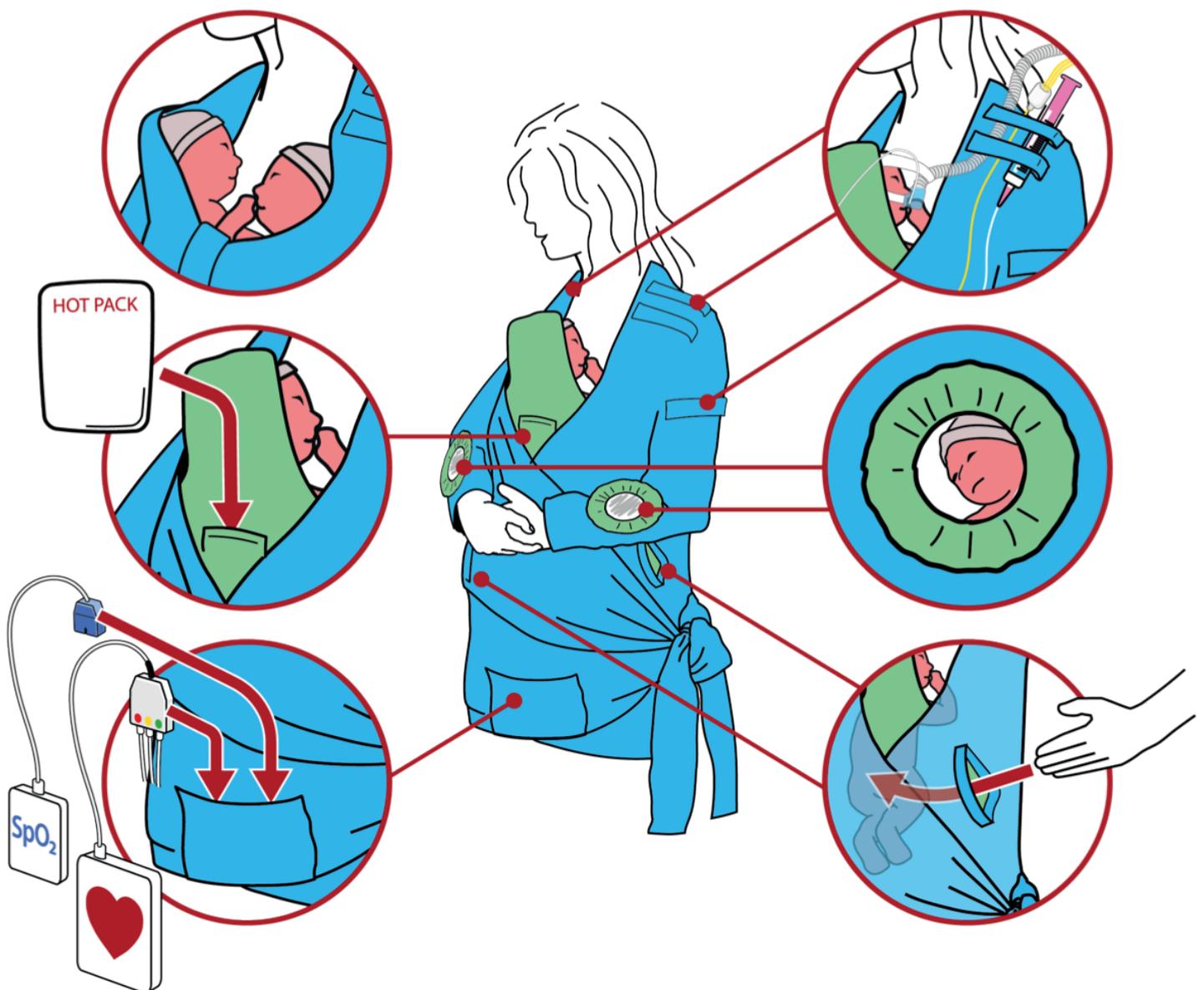

Vorwort

Vielen Dank für den Erwerb des Benjamin Kangaroo Sweaters. Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen zur schnellen Gewöhnung an das Produkt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig. Die mitgelieferte Anleitungskarte ist zusammen mit der Bedienungsanleitung zu verwenden. Diese Information richtet sich an Fachpersonal im Gesundheitswesen. Gemeinsam mit den Eltern/Betreuern können Sie sich an die Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters gewöhnen. Bitte lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Verwendung des Produkts. In dieser Gebrauchsanweisung wird die sichere Handhabung des Benjamin Kangaroo Sweaters im Krankenhaus beschrieben.

Studien haben gezeigt, dass direkter Haut-auf-Haut-Kontakt zwischen Eltern und ihrem Frühgeborenen viele positive Folgen hat. Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass die Bindung zwischen Eltern und Kind gefördert, die Muttermilchproduktion stimuliert und das Wachstum sowie die neurologische Entwicklung des Kindes günstig beeinflusst werden. Außerdem ist Känguruhen gut für die Entwicklung des Immunsystems, für die Stabilisierung der Atmung und des Herzschlages, für die Temperaturregulierung und für die Schlafdauer. Es hat sich außerdem herausgestellt, dass auch Eltern vom Känguruhen profitieren. Sie erhalten hierdurch die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zur Gesundheit ihres Kindes zu leisten. Jüngste wissenschaftliche Studien bestätigen, dass die positiven Auswirkungen des Känguruhens auch längerfristig zu beobachten sind. Für den Haut-auf-Haut-Kontakt gilt folgende Regel: je länger die Dauer, desto größer die Wirkung.

Hierbei handelt es sich um die originale Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

Nehmen Sie bitte zwecks weiterer Informationen oder Bestellung der Bedienungsanleitungen Kontakt mit uns auf unter:

Benjamin Care
Utrechtseweg 59
3732 HA De Bilt
Nederland
Telefoon: +31307371114
E-mail: info@benjamincare.nl
www.benjamincare.nl



Inhaltsangabe

1. Einleitung	6
1.1 Zweckmäßige und zweckwidrige Verwendung	6
1.2 Wann Känguruhen?	7
1.3 Haftungsbeschränkung	7
1.4 Gebrauchte Symbole	8
2. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen	8
2.1 Verantwortung des Benutzers	10
2.2 Patientenüberwachung	10
2.3 Sitz- oder Liegeunterstützung	10
3. Produktspezifikationen	11
4. Verwendung	11
4.1 Vorbereitung	11
4.2 Anziehen des Sweaters und Transfer des Kindes in den Beutel	12
4.3 Befestigung medizinischer Geräte	14
4.4 Das Känguruhen	14
4.5 Zurück in den Inkubator oder ins Bett	15
5. Waschanleitung	16
6. Pflegehinweise	17
7. Garantie	17

1. Einleitung

1.1 Zweckmäßige und zweckwidrige Verwendung

 WARNUNG	Dieses Produkt ist nur unter Aufsicht von qualifiziertem medizinischen Personal, das über die derzeitig bekannten Risiken und Vorteile des Känguruens informiert ist, zu verwenden.
 WARNUNG	Überwachen Sie immer Eltern und Patient während der Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters.

Känguruhen ist das Haut-auf-Haut-Festhalten des zu frühgeborenen oder termingeborenen Säuglings auf der Brust eines Elternteils.

Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass die Känguruhmethode medizinische Vorteile für das (frühgeborene) Kind bietet. Diese Methode wird in immer größerem Maße auf der Neonatologie und anderen Pflegeabteilungen für Neugeborene angewendet.

Der Benjamin Kangaroo Sweater ist ein spezielles Kleidungsstück, das komfortables, warmes und sicheres Känguruhen ermöglicht. Der Benjamin Kangaroo Sweater ist nicht geeignet, um damit herumzulaufen; er ist kein Tragesack oder -tuch.

Der Benjamin Kangaroo Sweater ist zur Verwendung in einer klinischen Umgebung geeignet, in der Frühgeborene, Mangelgeborene bzw. kranke Säuglinge behandelt werden. Der Benjamin Kangaroo Sweater kann für Säuglinge mit einem Gewicht bis zu 4 kg verwendet werden. Der Benjamin Kangaroo Sweater bietet folgende Vorteile zur Versorgung und Behandlung:

- Der Sweater hält Kind und Elternteil warm.
- Das Kind liegt fixiert am Körper des Elternteils.
- Der Elternteil kann seine Hände frei bewegen, um zum Beispiel ein Buch zu lesen.
- Der Elternteil kann auch über einen längeren Zeitraum komfortabel känguruhen.
- Sonden, Beatmungs- und Infusionsschläuche sowie Kabel der Überwachungsgeräte können am Sweater fixiert werden.
- In einer speziellen Tasche kann eine Wärmekomresse angebracht werden, um gegebenenfalls dem Kind am Rücken zusätzliche Wärme zuzuführen.
- Über die Spiegel im Ärmel kann der Elternteil das Gesicht seines Kindes sehen.
- Der Elternteil kann den Rücken des Kindes durch spezielle Öffnungen berühren.
- Der Kangaroo Sweater bietet dem Elternteil Privatsphäre, da der Oberkörper nicht entblößt werden muss.

1.2 Wann känguruhen?

Nahezu alle Säuglinge kommen für das Känguruhen in Betracht. In der täglichen Praxis stellt die nCPAP, die Beatmung mit zusätzlichem Sauerstoff, eine Infusion oder Monitorüberwachung keine Beeinträchtigung dar. Die Entscheidung jedoch, ob das Kind überhaupt zum Känguruhen in der Lage ist, muss immer vom medizinischen Personal getroffen werden. Die körperliche Stabilität und das Verhalten des Kindes spielen hierbei eine wichtige Rolle. Einige allgemeine Voraussetzungen sind: der Säugling muss das Känguruhen als angenehm erfahren und vertragen können. Manche Säuglinge reagieren ablehnend auf Berührungen. Oftmals ist dies nur vorübergehend, aber solange ein Säugling ablehnend reagiert, sollte das Kind besser in Ruhe gelassen werden.



WARNUNG

KONTRAINDIKATION beim Känguruhen

Es können Gründe vorliegen, aufgrund derer medizinisches Fachpersonal entscheiden kann, dass das Kind nicht für das Känguruhen in Betracht kommt:

- Konvulsionen
- Hoher Sauerstoffbedarf >40 %
- Hohe Beatmungsbedingungen unter Verabreichung von NO
- Sepsis
- Postoperative Situation mit frischer Bauchwunde und Drainagen oder Thoraxdrainage
- Situation nach einer anderen eingreifenden Operation
- Arterielle und venöse Nabelkatheter, die sich verschieben können
- Sehr instabile Parameter mit ständiger medikamentöser Intervention. Zum Beispiel Hypotonie mit Inotropikabedarf

1.3 Haftungsbeschränkung

Wird das Produkt auf eine mit dem beabsichtigten Verwendungszweck nicht vereinbare Weise verwendet, wird die Haftung für die ordnungsgemäße Funktion des Produktes dauerhaft an den Eigentümer bzw. Besitzer übertragen, unabhängig davon, ob dies im Zusammenhang mit oder aufgrund der Herstellung und des Verkaufs der Waren, der Vorführung, Verkaufsvertretung, Benutzung, Leistung oder anderweitig, einschließlich etwaiger Haftung aufgrund der „Benjamin Care“-Produktgarantie, zurückzuführen ist.

Benjamin Care kann nicht für einen eventuell entstandenen Schaden verantwortlich gemacht

werden, aufgrund:

- der Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Empfehlungen,
- zweckwidriger, unsachgemäßer Verwendung bzw. Missbrauchs.

Benutzer des Benjamin Kangaroo Sweaters haben selbst die Verantwortung für eine geeignete Überwachung des Zustands des Patienten zu tragen. Dies kann mittels elektronischer Überwachung des Patienten und Beobachtung erfolgen. Die Verantwortung zur Wahl des richtigen Überwachungsgrads liegt einzig und allein bei dem Benutzer.

1.4 Gebrauchte Symbole

Symbol	Erklärung
 WARNUNG	Das Symbol „Warnung“ verweist auf Verletzungsrisiken im Fall einer Nichteinhaltung der Anweisung.
 VORSICHT	Das Symbol „Vorsicht“ zeigt im Fall einer Nichteinhaltung der Anweisung die Wahrscheinlichkeit auf Produktschäden an.
 ACHTUNG	Das Symbol „Achtung“ bietet ergänzende Informationen zur Vermeidung von Problemen bei der Verwendung.
	Dies ist ein Anwendungsschritt in der beschriebenen Benutzungsanleitung. Diese Nummer stimmt mit der Nummer der dazugehörigen Abbildung auf der Anleitungskarte überein.

2. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen

- Jede Pflegekraft, die einem Elternteil bei der Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters assistiert, ihn unterstützt oder begleitet, hat diese Gebrauchsanweisung vor Verwendung sorgfältig zu lesen.
- Informieren Sie die Eltern über die Verwendung und den Zweck des Benjamin Kangaroo Sweaters. Verwenden Sie die Anleitungskarte hierbei als Informationshilfe.
- Verwenden Sie den Benjamin Kangaroo Sweater nur gemäß der Vorschriften in dieser Bedienungsanleitung.

- Überwachen Sie während des Känguruhen mit dem Benjamin Kangaroo Sweater die Vitalfunktionen des Kindes.
- Verwenden Sie den Benjamin Kangaroo Sweater nicht bei Kindern, die schwerer als 4 kg sind.
- Kontrollieren Sie den Benjamin Kangaroo Sweater bereits vor seiner Verwendung. unabsichtliche Extubation.
- Überprüfen Sie den Stoff auf Abnutzung, Risse und offene Nähte. Vergewissern Sie sich, dass die zwei Reißverschlüsse, der Stopper und der Klettverschluss ordnungsgemäß funktionieren.
- Waschen Sie den Benjamin Kangaroo Sweater vor der ersten Verwendung nach den Anweisungen in Kapitel 5 dieser Bedienungsanleitung.
- Waschen und bewahren Sie den Benjamin Kangaroo Sweater nach den Anweisungen in Kapitel 5 dieser Bedienungsanleitung.
- Befolgen Sie zur Vermeidung einer Kreuzkontamination strikt die Hygienevorschriften.
- Achten Sie darauf, dass sich der Kopf des Kindes nicht nach vorn oder hinten beugt. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Atemwege führen.
- Achten Sie darauf, dass sich die Füße des Kindes im Säckchen unten im Beutel befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Gliedmaßen des Kindes nicht in den Schläuchen oder der Verkabelung eingeklemmt werden oder sich darin verfangen.
- Der Benjamin Kangaroo Sweater ist nicht geeignet, um damit herumzulaufen; er ist kein Tragesack oder -tuch.
- Sorgen Sie für eine Sitz- oder Liegeunterstützung, die die gestellten Anforderungen gemäß Paragraph 2.3 erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass die Mütze des Beutels nicht über dem Gesicht des Säuglings liegt. Die Atemwege des Kindes sind zwecks optimaler Respiration freizuhalten.
- Schließen Sie den Reißverschluss umsichtig, damit keine Verletzungen an der Haut des Kindes oder des Elternteils entstehen.
- Achten Sie auf das eventuelle Abklemmen von Infusionen.
- Sorgen Sie gegebenenfalls dafür, dass die Wärmekompressen ordnungsgemäß temperiert ist, um Verbrennungen oder Auskühlung des Säuglings vorzubeugen. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Wärmekompressen die richtige Temperatur hat.
- Seien Sie vorsichtig bei der Nahrungszufuhr des Kindes. Hebt ein Elternteil den Arm an, um in den Spiegel zu schauen, kann die Nahrung aus der Spritze herausfließen.
- Stellen Sie sicher, dass der Beutel nicht zu locker sitzt. Dies kann zu einem Herausrutschen des Kindes aus dem Beutel führen. Überprüfen Sie ebenfalls, ob der Beutel nicht zu fest sitzt. Das Kind benötigt genügend Raum zur Diaphragmalatmung.
- Achten Sie darauf, dass die Schläuche und Kabel locker hängen und nicht unter Spannung stehen, und kontrollieren Sie regelmäßig auf Diskonnektion bzw. Obstruktion.
- Beugen Sie Loslösen oder Verschließen von Schläuchen, intravenösen oder arteriellen Zugängen vor. Vermeiden Sie im Besonderen bei intubierten Kindern eine Testen Sie

- unabsichtliche Extubation.
den Benjamin Kangaroo Sweater zuerst ohne Kind. Üben Sie das Öffnen und Schließen, während eine andere Person den Benjamin Kangaroo Sweater trägt. Seien Sie darauf vorbereitet, den Benjamin Kangaroo Sweater schnell öffnen zu können, damit das Kind in einer akuten Situation die notwendige Versorgung erhalten kann.

2.1 Verantwortung des Benutzers

Grundlage des Entwurfs des Benjamin Kangaroo Sweaters, der dazugehörigen Dokumente und der Etiketten ist, dass sich die Verwendung des Produkts auf Eltern beschränkt, die unter Aufsicht medizinischen Personals stehen, welches über die derzeit bekannten Risiken und Vorteile des Känguruhens informiert ist. Die Anweisungen und Warnungen beziehen sich deshalb größtenteils auf die Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters und nicht auf die Anwendung der Känguruhmethode als solches.

Diese Bedienungsanleitung enthält keine Hinweise auf Gefahren, die für medizinisch qualifizierte Pflegekräfte, die den Elternteil bei der Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters begleiten, selbstverständlich sind. Diese Ausgabe enthält außerdem weder Hinweise auf Folgen aufgrund eines Missbrauchs des Produkts, noch auf mögliche nachteilige Auswirkungen auf den Patienten. Der Missbrauch des Produkts sowie die Durchführung von Änderungen am Produkt kann gefährlich sein.

Benjamin Care ist weder für Folgen haftbar, die aus vorgenommenen Änderungen am Produkt hervorgehen, noch für Folgen, die aus der Verwendung des Sweaters in Kombination mit anderen nicht von Benjamin Care angegebenen Produkten hervorgehen.

2.2 Patientenüberwachung

Das medizinische Fachpersonal, welches den Elternteil beaufsichtigt, der den Benjamin Kangaroo Sweater verwendet, trägt die Verantwortung hinsichtlich der Art und Intensität der Überwachung des Allgemeinzustandes des Patienten und der Verwendung des Produkts. Die Verantwortung für die Überwachung des Patienten liegt ganz allein beim Pflegepersonal.

2.3 Sitz- oder Liegeunterstützung

Das Vorhandensein eines komfortablen Stuhls mit verstellbarer Rückenlehne ist wichtig. Eine bequeme, sitzende oder liegende Position ist essenziell, um entspannen zu können.

Wird die Känguruhmethode in einer sitzenden Position durchgeführt, wird dem Elternteil empfohlen, auf einem komfortablen Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne zu sitzen.

Känguruhens ist auch möglich, wenn der Elternteil im Bett liegt. Die optimale Position im Bett ist, ausgehend von der Horizontalen, 15 - 30° nach oben.

Es wird empfohlen, den Stuhl so zu positionieren, dass der Elternteil nicht den Monitor sehen kann. Das Beobachten des Monitors hat einen störenden Einfluss auf die Interaktion zwischen Elternteil und Kind. Falls möglich, schließen Sie die Gardinen oder stellen einen Sichtschutz auf, um Privatsphäre und Ruhe zu schaffen. Dämpfen Sie Licht und Geräusche.

3. Produktspezifikationen

Produktname	Benjamin Kangaroo Sweater
Hersteller	Benjamin Care
Material	97 % Dri-Release (25 % Polyester, 15 % Baumwolle, 3 % Elasthan)

Klassifikation

Der Benjamin Kangaroo Sweater ist kein medizinisches Hilfsmittel, da er ausschließlich zum Zwecke der Behaglichkeit des Elternteils/Betreuers eingesetzt wird. Dieses Produkt ist nicht für diagnostische bzw. therapeutische Zwecke laut Art. 1 Absatz 2 der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) bestimmt.

Dieses Produkt erfüllt die Spezifikationen der DIN CEN/TS 14237:2015 Textilien für Einrichtungen des Gesundheitswesens und von sozialen Diensten.

4. Verwendung

4.1 Vorbereitung

Beachten Sie alle in Kapitel 2 genannten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsanweisungen. Zuallererst hat der Elternteil die Hygienevorschriften hinsichtlich des Känguruhens zu beachten: tägliches Duschen, saubere Kleidung und gute Handhygiene. Bevor das Kind berührt wird, müssen die Hände gründlich gewaschen werden.

Bereiten Sie das Kind gemeinsam mit dem Elternteil auf das Känguruen vor: Kontrollieren Sie die Temperatur und ziehen dem Kind bei Bedarf frische Windeln an. Gegebenenfalls ziehen sie das Kind aus, lassen aber die Windel, Socken und Mütze an. Überprüfen Sie alle Geräte, Infusionen und Schläuche, an die das Kind verbunden ist. Überprüfen Sie die Alarめinstellungen des Inkubators und des Geräts, an welches das Kind verbunden ist.

Bestimmen Sie anhand der Größe des Kindes, ob Zwischenstücke erforderlich sind. Falls ja, befestigen Sie diese schon einmal am Beutel. Im Fall von Zwillingen verwenden Sie den Zwillingsbeutel.

4.2 Anziehen des Sweaters und Transfer des Kindes in den Beutel

 WARNUNG	Befolgen Sie zur Vermeidung einer Kreuzkontamination strikt die Hygienevorschriften.
 WARNUNG	Überwachen Sie während der Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters immer die Vitalfunktionen des Kindes.
 WARNUNG	Achten Sie darauf, dass die Gliedmaßen des Kindes nicht in den Schläuchen oder der Verkabelung eingeklemmt werden oder sich darin verfangen.

	Veranlassen Sie, dass der Elternteil seinen Oberkörper entkleidet und den Sweater anzieht, indem er die Arme durch die Ärmel steckt. Achten Sie darauf, dass der Sweater an der Vorderseite offenbleibt, und dass nur eine Seite des Beutels (A) oder des Beutels mit den Zwischenstücken (B) über den Reißverschluss an dem Sweater befestigt ist, während die andere Seite des Beutels freihängt.
---	---

Transfer

Der Transfer des Kindes zum Elternteil wird laut Krankenhausprotokoll durchgeführt. Meist wird dies gemeinsam mit dem Elternteil vorgenommen. Vorzugsweise führt der Elternteil, sofern möglich, den Transfer unter Aussicht selbst durch.

Halten Sie das Kind mit einer Hand an der Rückseite des Nackens des Kindes fest. Unterstützen Sie die Unterseite des Kiefers leicht mit Daumen und Finger, um ein Wegrutschen des Kopfes zu verhindern, wenn das Kind aufrecht positioniert wird. Legen Sie die andere Hand unter das Gesäß des Kindes.

2	Legen Sie das Kind in vertikaler Position mit dem Kopf etwas nach oben gerichtet und zur Seite gedreht („Schnüffelstellung“) auf die entblößte Brust des Elternteils. Der Kopf und der Körper des Kindes müssen zwecks optimaler Atmung des Kindes in einer Linie liegen. Sorgen Sie dafür, dass die Arme und Beine sich in der sogenannten „Froschhaltung“ (Beine und Arme in Extension) befinden .
3	Legen Sie den Beutel des Sweaters über das Kind und lagern die Füße in den Sack unten im Beutel.
4	Führen Sie die Monitorkabel bzw. das Pulsoxymeter zur Unterseite des Sweaters und stecken es in den hierfür vorgesehenen Sack. Achten Sie darauf, dass sich die Beine nicht in den Kabeln verfangen. Schließen Sie den Beutel mit dem zweiten Reißverschluss.
5	Ziehen Sie die Unterseite des Beutels mit dem Stopper an der Kordel fest, um den Säugling stabil und sicher gegen die Brust des Elternteils zu lagern und zu fixieren.
6	Ziehen Sie das linke Hüftband durch das Loch an der rechten Unterseite des Sweaters. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Öffnung darüber verwenden. Wickeln Sie das Hüftband hinter dem Rücken herum nach vorne.
7	Knoten Sie beide Bänder mit einem Doppelknoten auf der Hüfte zusammen. Jetzt liegt das Kind in einer sicheren Haltung an die Brust des Elternteils angelehnt.
 ACHTUNG	Achten Sie darauf, dass die Haut des Kindes und des Elternteils nicht verletzt wird. Kontrollieren Sie, ob der Säugling bequem liegt.
 WARNUNG	Achten Sie darauf, dass sich der Kopf des Kindes nicht nach vorn oder hinten beugt. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Atemwege führen.
 WARNUNG	Vergewissern Sie sich, dass der Beutel nicht zu locker sitzt. Dies kann zu einem Herausrutschen des Kindes aus dem Beutel führen. Überprüfen Sie ebenfalls, ob der Beutel nicht zu fest sitzt. Das Kind benötigt genügend Platz zur Diaphragmalatmung.
 WARNUNG	Die ordnungsgemäße Fixierung des Kindes ist zur Vorbeugung eines Sturzes des Säuglings von größter Wichtigkeit. Kontrollieren Sie alle Befestigungspunkte.

4.3 Befestigung medizinischer Geräte

Fixieren Sie die nCPAP-Schläuche, Beatmungsschläuche, Sauerstoffschläuche und Infusionsschläuche, abhängig von der Position des Kopfes des Kindes, mit den Klettband-Fixierbändern auf der Schulter oder an der Seite der Ärmel (siehe Deckblatt). Achten Sie darauf, dass die Schläuche und Kabel locker hängen und nicht unter Spannung stehen, und kontrollieren Sie regelmäßig auf Diskonnektion bzw. Obstruktion.

Gegebenenfalls fixieren Sie die Ernährungsspritze mit dem Klettverschluss. Stecken Sie die Steckdose des Monitors und Pulsoxymeters in den Sack am Hüftband (siehe Deckblatt).

Es kann eventuell eine Wärmekompressen in den kleinen Sack an der Rückseite des Beutels gesteckt werden, um dem Kind zusätzliche Wärme zuzuführen (siehe Deckblatt). Sind die Ärmel zu lang, können diese umgeschlagen werden.

Wenn Elternteil und Kind ihre Haltung angenommen haben, sorgen Sie dafür, dass alle Schläuche, Infusionsschläuche und Kabel ordnungsgemäß positioniert sind (siehe Deckblatt).

 WARNUNG	Achten Sie darauf, dass die Schläuche und Kabel locker hängen und nicht unter Spannung stehen, und kontrollieren Sie regelmäßig auf Diskonnektion bzw. Obstruktion.
 ACHTUNG	Öffnen Sie den Klettverschluss bitte vorsichtig, damit das Kind nicht durch das Geräusch des Klettverschlusses gestört wird.

4.4 Das Känguruhen

 WARNUNG	Überwachen Sie Eltern und Patient stets während der Verwendung des Sweaters.
--	--

Befinden sich Elternteil und Kind in der richtigen Position oder in einer Liegehaltung, kann der Elternteil die Hände durch die Öffnungen an der Seite des Benjamin Kangaroo Sweaters hindurchstecken, um den Rücken des Kindes zu berühren (siehe Deckblatt).

 WARNUNG	Bei Verwendung eines Zwillingsbeutels muss darauf geachtet werden, dass sich die Kinder nicht in den Infusionsschläuchen und Monitorkabeln verfangen können.
 ACHTUNG	Sorgen Sie dafür, dass die Hände der Eltern warm sind, damit beim Kind Stress vermieden wird.

Über die Spiegel im Ärmel kann der Elternteil das Gesicht seines Kindes sehen (siehe Deckblatt).

Wird das Kind über eine Nahrungssonde ernährt, kann die Spritze am Benjamin Kangaroo Sweater fixiert werden. Die Flüssigkeit kann dann „frei“ hineinfließen.

 ACHTUNG	Seien Sie vorsichtig bei der Nahrungszufuhr des Kindes. Hebt ein Elternteil den Arm an, um in den Spiegel zu schauen, kann die Nahrung aus der Spritze herausfließen.
--	---

In dem Sweater kann auch gestillt werden. Das Kind kann zusammen mit der Mutter so gelagert werden, dass es bequem trinken kann. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Elternteils und Kindes. Achten Sie auf Obstruktion und Diskonnektion des Infusionsschlauches oder anderer Schläuche.

Die Dauer des Känguruhens kann je nach Situation unterschiedlich sein. Dies hängt von der Stabilität des Kindes und dem Zustand des Elternteils ab. Es wird eine möglichst lange Dauer angestrebt. Der Transfer kann für das Kind anstrengend sein.

4.5 Zurück in den Inkubator oder ins Bett

Legen Sie gemeinsam mit dem Elternteil den Säugling in den Inkubator oder in das Bett zurück, wenn das Känguruhen beendet wird. Abhängig von der Erfahrung des Elternteils und dem Zustand des Kindes kann dieser Schritt von der Pflegekraft oder vom Elternteil durchgeführt werden.

Entfernen Sie die Steckdosen des Monitors und Pulsoxymeters aus dem Sack am Hüftband des Sweaters. Öffnen Sie den Klettverschluss und entfernen die Schläuche, Infusionsschläuche und die Ernährungsspritze. Öffnen Sie den Doppelknoten des Hüftbandes. Ziehen Sie den Stopper, der an der Kordel an der Beutelunterseite befestigt ist, nach unten. Öffnen Sie den Reißverschluss an nur einer Seite des Sweaters.

Achten Sie darauf, dass alle mit medizinischen Geräten verbundenen Schläuche und Kabel nicht mehr am Sweater befestigt sind.

Halten Sie das Kind mit einer Hand an der Rückseite des Nackens des Kindes fest. Unterstützen Sie die Unterseite des Kiefers leicht mit Daumen und Finger, um ein Wegrutschen des Kopfes zu verhindern, wenn das Kind aufrecht positioniert wird. Legen Sie die andere Hand unter das Gesäß des Kindes. Kontrollieren Sie, ob Schläuche, Infusionsschläuche und Monitorkabel locker hängen und nicht unter Spannung stehen. Transportieren Sie das Kind vorsichtig zum Inkubator oder zum Bett. Lagern Sie das Kind und kontrollieren alle medizinischen Geräte und den Zustand des Kindes.

Legen Sie den Sweater nach Verwendung in einen Behälter oder eine spezielle Aufbewahrungstasche (falls verfügbar). Der Sweater muss immer an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden.

5. Waschanleitung



WARNUNG

Wurde der Benjamin Kangaroo Sweater beschmutzt, oder ist er auf den Boden gefallen, muss der Sweater immer gewaschen werden.

Der Benjamin Kangaroo Sweater wurde aus einem fortschrittlichen, technischen Stoff - einer Polyester- und Baumwollmischung - hergestellt. Dieser Stoff trocknet viermal schneller als Baumwolle, läuft nicht ein, bildet keine Knötchen und bleibt geruchsfrei.

Der Benjamin Kangaroo Sweater muss bei 60° gewaschen werden, um die Entstehung von Bakterien zu verhindern. Der Benjamin Kangaroo Sweater kann auch bei einer Temperatur von 90° C gewaschen werden, dies führt jedoch zu einer Lebensdauerverkürzung des Sweaters. Schließen Sie vor dem Waschen die Reißverschlüsse und entfernen die Spiegel aus den Ärmeln. Die Spiegel können mit Alkohol oder warmem Wasser und einem Haushaltsreinigungsmittel gereinigt werden.

Bei Verwendung des Benjamin Kangaroo Sweaters ist dieser mindestens einmal (1 x) wöchentlich zu waschen. Verwendet ein Elternteil einen Sweater, der Eigentum des Krankenhauses ist, muss darauf geachtet werden, dass der Benjamin Kangaroo Sweater immer gewaschen wird, bevor er von einem neuen Patienten benutzt wird.

Klettverschluss

Schützen Sie die Klettverschlüsse, indem sie diese vor dem Waschen schließen. Waschen Sie den Benjamin Kangaroo Sweater in einem Waschnetz, wenn er zusammen mit anderer Wäsche gewaschen wird. Auf diese Weise kann das Klettband nicht an der anderen Wäsche hängen bleiben. Ist ein Waschnetz nicht verfügbar, kann auch ein großer Kissenbezug verwendet werden.

Waschmittel

Verwenden Sie vorzugsweise ein hypoallergenes Waschmittel ohne Farbstoffe, Parfüm oder Konservierungsstoffe. Dies ist für die empfindliche Haut des Kindes am sichersten.

ACHTUNG

Flüssige Waschmittel werden leichter als Waschpulver ausgespült und eignen sich darum wahrscheinlich besser für empfindliche Haut.

Weichspüler

Verwenden Sie keinen Weichspüler. Weichspüler enthalten möglicherweise Stoffe, die zu allergischen Reaktionen führen können. Außerdem geben sie oft einen starken Geruch an die Wäsche ab, dies ist während des Känguruhens nicht zu empfehlen. Der Geruch der Eltern soll überwiegen.

Trocknen

Der Benjamin Kangaroo Sweater kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Schließen Sie die Reißverschlüsse und die Fixierungsbänder des Klettbandes, bevor sie den Benjamin Kangaroo Sweater in den Wäschetrockner geben. Die Verwendung eines Wäschetrockners kann zu einer Lebensdauerverkürzung des Benjamin Kangaroo Sweaters führen. Um den Benjamin Kangaroo Sweater so lang wie möglich in gutem Zustand zu erhalten, kann dieser am besten zum Trocknen an der Luft aufgehängt werden.

Bügeln

Das Bügeln des Benjamin Kangaroo Sweater wird NICHT empfohlen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Benjamin Kangaroo Sweater an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Ende der Verwendungsdauer

Das Produkt kann am Ende der Verwendungsdauer als übliche (Krankenhaus-) Kleidung ausrangiert werden.

6. Pflegehinweise

Kontrollieren Sie den Benjamin Kangaroo Sweater und das Zubehör regelmäßig auf eventuelle offene Nähte, Löcher, Risse, lose Fäden und nicht zu entfernende Flecken. Sehen Sie in diesem Fall von der Verwendung des Produkts ab.

7. Garantie

Benjamin Care bietet bei sachgemäßer Verwendung des Produkts eine beschränkte Garantie von 6 Monaten auf Herstellungs- und Materialfehler. Jeglicher, durch unsachgemäße Nutzung, falsche Handhabung, Reinigung oder Nachlässigkeit, entstandene Schaden fällt nicht unter diese Garantie.

Vertrieb:

KREIENBAUM Neoscience GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 9
40764 Langenfeld, Deutschland
Tel.: +49 2173 - 399 27 - 0
Web: www.kreienbaum-neo.de

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

