



## Positionierungssystem Waffle Grip- HotDog Patientenwärmesystem

**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE

# WaffleGrip

## Einzigartiges Trendelenburg-Positionierungssystem mit Wärmezufuhr

Während der Trendelenburg Positionierung wird der Patient mit Hilfe von umständlichen Positionierungshilfen in einem Winkel von bis zu 45° Winkel positioniert, um während einer OP besseren Zugriff zu bestimmten Bereichen zu ermöglichen. Die Wärmezufuhr wird aufgrund der aufwendigen Positionierung oft vernachlässigt, was das Risiko einer intraoperativen Hypothermie birgt.

**Das WaffleGrip Trendelenburg Kit ermöglicht, zusammen mit einer HotDog Wärmematratze eine sichere und unkomplizierte Positionierung des Patienten bei gleichzeitig effizienter Wärmezufuhr.**

**WaffleGrip Trendelenburg Kit (Art.-Nr.: A300, VE à 10 Stk.) für den Einmalgebrauch**

**WaffleGrip Antirutsch-Matte**

**Vliesunterlage für die Armsicherung und Umpositionierung**

**Befestigungsband für Tuch/Decke**

**Zwei Einwegclips**

Die WaffleGrip Antirutsch-Matte hat eine Oberfläche mit hoher Reibung und liefert somit eine gleichmäßig verteilte Rutschfestigkeit. Lokale Druckpunkte und Scherkräfte werden somit eliminiert - auch bei einem hohen BMI.

### So funktioniert das System:

1. Befestigung der HotDog Wärmematratze am OP-Tisch.
2. Auflegen der WaffleGrip Antirutschmatte und Sicherung durch optimal abgestimmte Falzkanten.
3. Platzieren der Fließunterlage für eventuelles Umpositionieren des Patienten und Sicherung der Arme.
4. Befestigungsband und Einwegclips dienen der Befestigung weiterer Wärmedecken oder Laken.



**Wärmematratze Trendelenburg**  
(Art.-Nr.: U300)  
58,42 cm B x 99,7 cm L / 1,04 kg

### HotDog® Temperaturmanagement- Controller (Art.-Nr.: WC77)

Ermöglicht das gleichzeitige Anschließen einer Wärmematratze und bis zu vier Wärmedecken.

Wählbare Temperaturen:  
Decken: 37 - 43 °C  
Matratzen: 35 - 40 °C



**Weitere  
Wärmematratzen  
und Wärmedecken,  
passend zu jeder OP  
Art, erhältlich!**

