
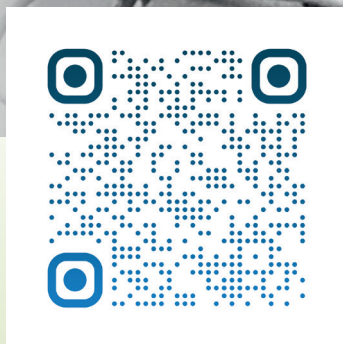


Knopfelektroden (EKG)

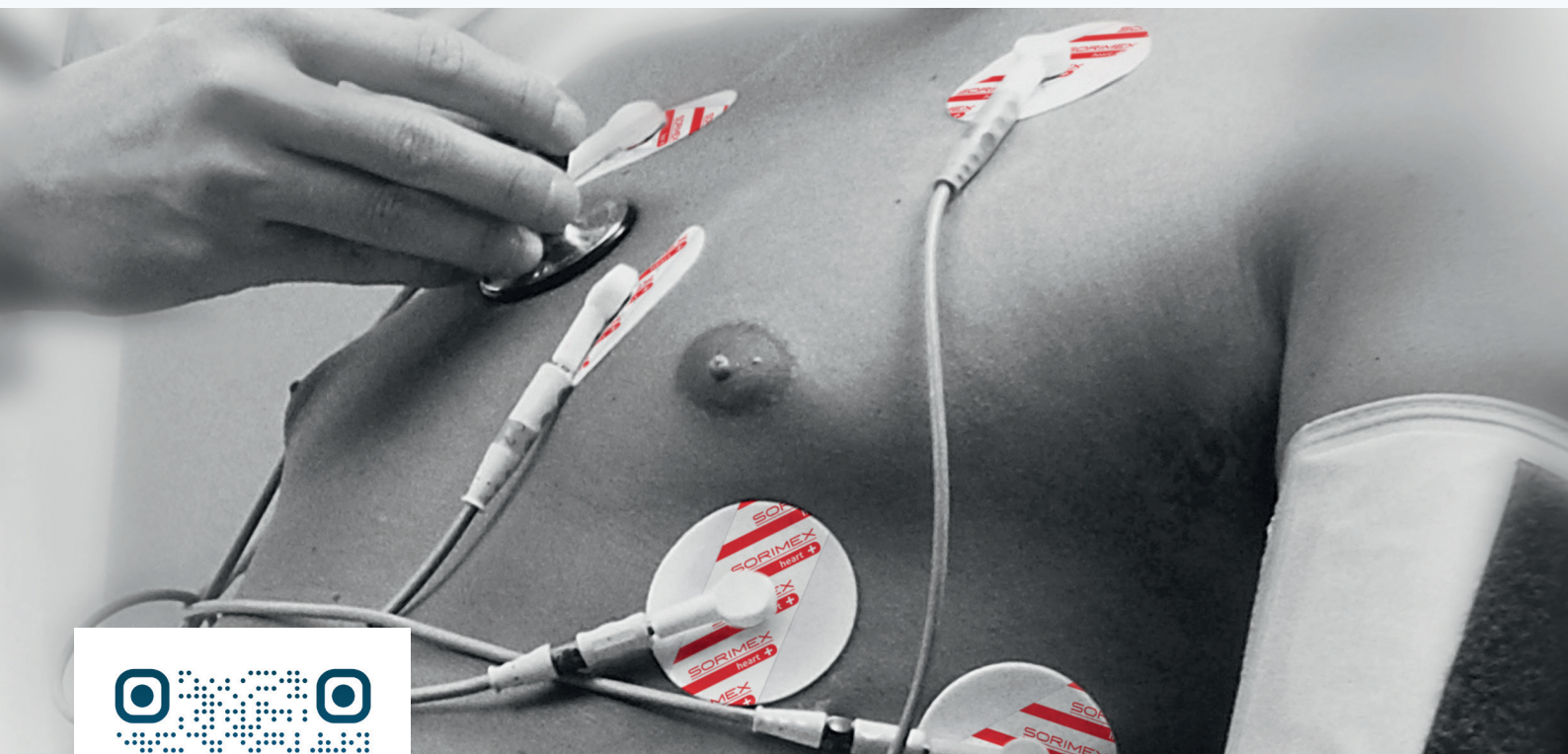

Weitere Informationen wie die
Bedienungsanleitung finden
Sie auf unserer Homepage.

- ✓ Für Kinder und Erwachsene
- ✓ In vielen verschiedenen Formen und Größen
- ✓ In der EU hergestellt

Knopfelektroden (EKG) für Säuglinge und Kinder



EK-S 22 PSG

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Säuglinge und Kinder

50 Stk./Beutel



EK-S 25 PSG

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Säuglinge und Kinder

50 Stk./Beutel



X-RAY



EK-S 30 PSG RTG


Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Säuglinge und Kinder

50 Stk./Beutel



NEU

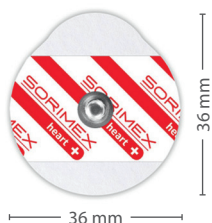

EK-S 36 P

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Kinder

50 Stk./Beutel



NEU

X-RAY



EK-S 37 P RTG

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Kinder

50 Stk./Beutel



Hinweis:

Dies ist nur eine Auswahl
der verfügbaren EKG
Elektroden.

**Weitere Formen und
Größen sind auf Anfrage
erhältlich!**

Knopfelektroden (EKG) für Erwachsene

HOHE
KLEBE-
KRAFT



EK-S 35 PSG ST

Für Belastungsuntersuchung
und Überwachung

Erwachsene

50 Stk./Beutel




EK-S 42 PSG

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Erwachsene und Kinder

50 Stk./Beutel

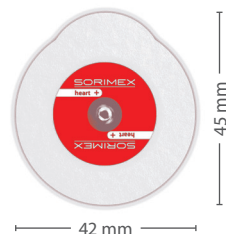

EK-S 45 PSG

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung

Erwachsene

50 Stk./Beutel



NEU



EK-S 48 PSG

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung


Erwachsene

50 Stk./Beutel



HOHE
KLEBE-
KRAFT

BASIS-
MATERIAL
NON-
WOVEN

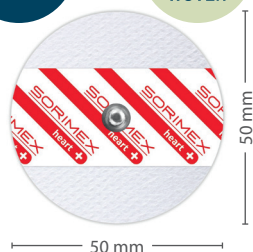

EK-S 50 NWSG

Für Belastungsuntersuchung
und Überwachung

Erwachsene

50 Stk./Beutel



NEU



EK-S 55 P

Für Ruheuntersuchung,
Diagnostik und Überwachung


Erwachsene

30 Stk./Beutel



NEU

KABEL-
EINSCHUB

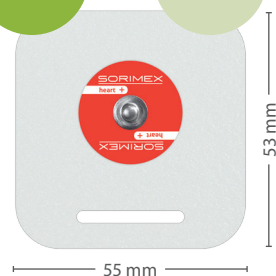

EK-S 61 PSG

Für Belastungsuntersuchung
Mit Ausschnitt für das Kabel

Erwachsene

50 Stk./Beutel




Anwendungshinweise:




**Haut rasieren,
falls erforderlich**




**Haut reinigen
und gründlich
abtrocknen**

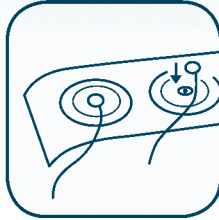

**Anschlusskabel
an eine Elektrode
anbringen**

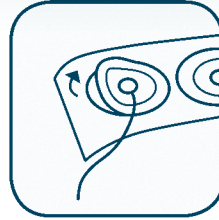

**Elektroden von der
transparenten Folie
abziehen**

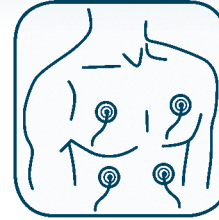

**Elektroden auf die
vorbereitete Haut
aufbringen**



**Originalverpackung
mit verbliebenen
Elektroden gut
verschließen**

Bitte lesen Sie die ausführlichen Anwendungshinweise in der Gebrauchsanleitung.

Hinweis:

Die Elektroden sind alle mit einem Druckknopf (Snap) ausgestattet. Kabel mit folgenden Konnektoren können zum Verbinden verwendet werden:



Druckknopf



Klemme

