


Anleitung für Lagerung und Reinigung

Bitte diese Hinweise vor dem Gebrauch lesen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Pflegepersonal.



1. Entfernen Sie den Spritzenkolben aus der Spritze. Waschen Sie beide Teile sorgfältig in handwarmem Seifenwasser (bitte Spülmittel verwenden). Bitte darauf achten alle Rückstände von Nahrung oder Medikamenten in Spalten und Ecken zu beseitigen.

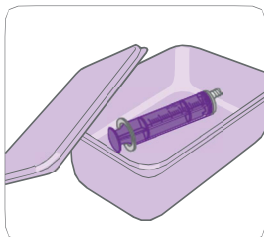

3. Spritzenteile ausschütteln um verbliebenes Wasser zu beseitigen und anschließend an der Luft trocknen lassen. Spritze nicht nass wieder zusammensetzen. Sobald alle Teile trocken sind, kann der Kolben wieder eingesetzt werden und die Spritze in einem sauberen, trockenen Behälter mit Deckel aufbewahrt werden.



2. Sorgfältig unter fließendem, kaltem Leitungswasser waschen um Seifenreste zu entfernen. Jedes einzelne Teil sollte anschließend auf Rückstände untersucht werden.



4. Die Spritze kann bis zu 6-mal am Tag gewaschen und wiederverwendet werden für höchstens 14 Tage.

Enteral ISO-SAF Home Spritzen sind für die Wiederverwendung bei einer Person gedacht. Sie können höchstens 14 Tage lang bis zu 6-mal am Tag wiederverwendet und gereinigt werden.

Spuren von Nahrung oder Medikamenten, die trocken und hart geworden sind, können eventuell durch Reinigen nicht entfernt werden. Deshalb müssen Spritzen, die wiederverwendet werden sollen **direkt nach dem Gebrauch gereinigt** werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Spritze nicht benutzen wenn sich der Kolben nicht einfach und reibungslos in den Schaft drücken lässt.
- Spritze nicht benutzen wenn sichtbare Schäden an dem Kolben oder Spritzenkörper zu sehen sind.
- Spritze verwerfen wenn die Volumenmarkierungen an der Seite nicht mehr klar und einfach zu lesen sind.

Bitte das Pflegepersonal konsultieren ob bestimmte örtliche Maßnahmen und Protokolle gelten.